

**HEINE XR Одноразовая ларингоскопическая рукоятка с нижней крышкой**



93/42/EWG/CEE/EEC

## Ларингоскопическая одноразовая рукоятка с нижним модулем HEINE XR.

### Инструкции по применению

Перед использованием ларингоскопической рукоятки HEINE XR, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и держите её под руками для обращения к ней по мере необходимости.

### Меры безопасности

**Область применения:** данная ларингоскопическая рукоятка HEINE XR предназначена только для одноразового использования и применяется для проведения эндотрахеальной интубации при помощи фибeroптических ларингоскопических клинков или клинков XR; рукоятка будет функционировать только при наличии в ней батарейки HEINE.


**Общие меры безопасности:** Используйте только пластиковые или металлические клинки с зеленой идентификационной отметкой. Не используйте ларингоскоп при наличии сильного магнитного поля.

Перед использованием убедитесь, что в рукоятку XR установлена батарейка HEINE и загорелся свет.

Образование перекрестной инфекции можно избежать только при использовании незараженных батареек.

**Безопасность при использовании:** функционирование данного прибора может быть гарантировано только при использовании батарейки HEINE, лампочки HEINE и фирменных запасных деталей HEINE.

### Настройка:

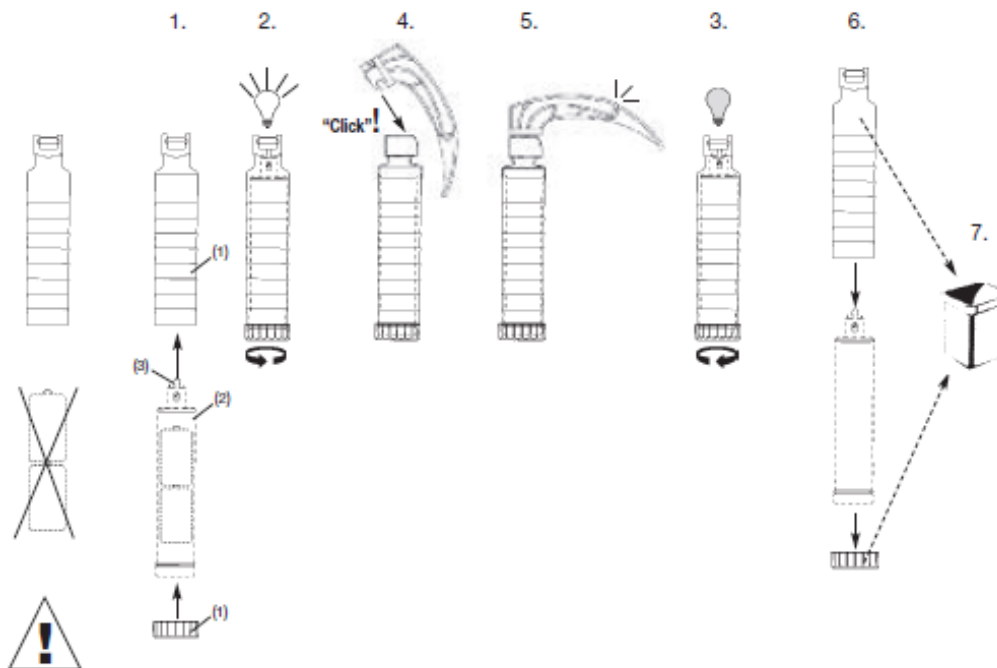

### Техническая информация

Транспортировка:  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Хранение:  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Условия использования:  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

### Аксессуары и запасные части

Батарейка

2,5 V F-01.22.859

Батарейка

3,5 V F-02.22.859

Ксенон-галогенная запасная лампочка XHL

2,5 V X-01.88.035

Ксенон-галогенная запасная лампочка XHL

3,5 V X-02.88.044

Rechargeable battery NiMH

Аккумулятор Li-ion

**Применимые стандарты: EN ISO 7376 : 2003**

3,5 V X-02.99.382

3,5 V X-07.99.381

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

" - "

<http://heine-med.ru/>  
[info@heine-med.ru](mailto:info@heine-med.ru)

127 238, . , Дмитровское ш. 85  
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ( ) -

!

