



HEINE Многоцелевой осветитель

Примечание: Перед использованием многоцелевого осветителя HEINE внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Область применения:

Многоцелевой осветитель HEINE предназначен для использования:

- как диагностический осветитель для общего обследования
- вместе со шпателем для исследования ротовой полости и горла
- вместе с фиброоптическим назальным осветителем и:
 - ушной воронкой для исследования уха
 - назальной воронкой для исследования носа

Требования безопасности: Используйте только рукоятки, рекомендованные для медицинского оборудования.

Использование прибора

Вставьте одноразовый шпатель в отверстие так далеко, как только возможно. Деревянный шпатель нужно просто вставить в отверстие (4).

Чтобы прикрепить фиброоптический назальный осветитель, вставляйте его в многоцелевой осветитель, пока не услышите щелчок. Две ножки должны располагаться в отверстиях (4), а световод (1) - в (3). С помощью байонетного коннектора к осветителю можно прикрепить воронку.

Замена лампочки

Примечание: исправная работа данного прибора гарантируется только при использовании фирменных ламп HEINE.

Отсоедините осветитель от рукоятки и вытащите использованную лампочку за шейку(5).

Очистка и стерилизация.

Для очистки и дезинфекции прибора можно использовать любой обычный раствор. Возможна стерилизация при температуре до 134 °C всех приборов, кроме фиброоптического назального осветителя.

Перед проведением стерилизации достаньте лампу из осветителя.

Аксессуары

Фиброоптический назальный осветитель

Назальная воронка

Раздвижная назальная воронка

Лампа HEINE XHL 2,5 V

Лампа HEINE XHL 3,5 V

B-00.12.321

B-00.11.220

B-00.11.231

X-01.88.077

X-02.88.078

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

" - "

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

