



Зеркало ларингеальное прямое Heine Инструкция пользователя

Примечание:

Перед использованием зеркала Heine внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Область применения:

Прямое ларингеальное зеркало и его аксессуары предназначены для освещения рта и горла во время медицинского обследования.

Требования безопасности:

Используйте только источники питания, предназначенные для медицинских приборов.

Не вставляйте изогнутый световой стержень без насадки в рот пациента, так как лампочка может нагреться. После использования

выключите прибор, чтобы он не перегревался. Все детали должны быть надежно прикреплены к световому стержню, чтобы они случайно не отсоединились во время использования прибора.

Использование прибора

Обычно достаточно тепла лампы, чтобы избежать помутнения зеркала во время использования. Рекомендуется включать прибор за несколько секунд до проведения обследования.

Замена лампы

Примечание: Исправная работа прибора гарантируется только в случае использования фирменных ламп HEINE

Отвинтите сначала прибор, а затем лампы от светового стержня.

Очистка и стерилизация

Не погружайте световой стержень в жидкость.

1. Очистка

Отвинтите прибор от светового стержня и протрите обе части тканью, смоченной в мыльном растворе или спирте.

2. Дезинфекция

После очистки протрите все детали прибора обычным дезинфектантом. Головку прибора можно погрузить дезинфицирующий раствор, но перед использованием ее необходимо высушить.

3. Стерилизация

Рекомендуется газовая стерилизация с оксидом этилена. Депрессор языка, трансиллюминатор или головку осветителя и защитную крышку можно автоклавировать. Автоклавиrowание зеркала и светового стержня запрещено.

Запасные части и аксессуары

Плоское зеркало 20 мм диам.	B-00.12.203
Вогнутое зеркало 20 мм диам.	B-00.12.204
Металлический депрессор языка	B-00.12.205
Трансиллюминатор	B-00.12.106
Защитный колпачок для лампы для ротовой иллюминации	B-00.12.107
Галогенная лампа HEINE XHL® 2,5 V	X-01.88.037
Галогенная лампа HEINE XHL® 3,5 V	X-02.88.062

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

