



Трансиллюминатор HEINE Финофф Руководство пользователя.

Примечание:

Перед использованием трансиллюминатора Финофф HEINE внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Область применения:

Трансиллюминатор HEINE Финофф предназначен для общей трансиллюминации тканей и, в особенности, для склеральной трансиллюминации. Его можно использовать вместе с голубым фильтром для трансиллюминации глаза.

Требования безопасности:

Используйте только источники питания, предназначенные для медицинских приборов. Трансиллюминацию глаза можно проводить, только когда надета защитная крышка.

Использование прибора

Рекомендуется проводить исследование в темной комнате. Поверхность глаза должна быть проанестезирована перед склеральной трансиллюминацией.

- Прикрепите трансиллюминатор к рукоятке и включите его.
- Для склеральной трансиллюминации, поместите кончик конуса с защитной крышкой на склере или роговицу без применения давления. Помните, что свет может раздражать пациента и что он затрудняет обнаружение мелких опухолей.
- Для трансиллюминации тканей кожи используйте прибор без защитной крышки.
- Для иллюминации глаза, установите голубой фильтр и поднесите прибор как можно ближе к глазу, но не касайтесь глаза.

Замена лампочки:

Примечание: Правильная работа прибора гарантирована только в том случае, если используются фирменные лампочки HEINE.

Снимите трансиллюминатор с рукоятки. Возьмите лапочку за основание (1) или за нарезку (2) и вытащите ее из прибора.

Очистка и обслуживание

Снимите защитную крышку и голубой фильтр перед очисткой прибора. Протрите прибор тканью, смоченной в слабом чистящем детергенте или дезинфицирующем растворе. Возможна газовая стерилизация. Автоклавирование и погружение в растворы. Для очистки синего фильтра и защитной крышки используйте любой обычный метод.

Запасные части и аксессуары

Защитная крышка	C-00.17.103
Кобальтовый фильтр	C-00.17.081
Лампа HEINE XHL® XENON 2,5 V / Тип А	X-01.88.077
Лампа HEINE XHL® XENON 3,5 V / Тип А	X-02.88.078
Лампа HEINE XHL® XENON 2,5 V / Тип В + С	X-01.88.035
Лампа HEINE XHL® XENON 3,5 V / Тип В + С	X-02.88.044

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

