

Батареечная рукоятка HEINE mini 3000



Данный прибор, как электронный, должен быть утилизирован отдельно, в соответствии с локальными требованиями.

Примечание:

Перед использованием батарейечной рукоятки Heine mini 3000 внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.



Область применения:

Батареечная рукоятка HEINE mini 3000 предназначена для использования только в качестве временного источника питания для приборов HEINE mini 3000.

Батарейки: 2 щелочных батарейки (AA /LR6)

Коннектор прибора: Внутренняя резьба на головке рукоятки (1).

Включение прибора: Нажмите на выключатель (2) – загорится красный индикатор.

Выключение прибора: Поднимите переключатель (2). Если положить рукоятку в карман одежды, она автоматически выключится.

Замена батареек: Открутите крышку (3) и вытряхните старые батарейки. Вставьте новые батарейки, так чтобы плюсовой контакт был направлен к головке рукоятки.

Очистка: Протрите тканью, смоченной в щелочном или рН-нейтральном детергенте. Для очистки внешней поверхности рекомендуется протереть ее детергентом, предназначенным специально для пластиковых медицинских приборов.

Дезинфекция при помощи спрэя, погружения в жидкость, а также стерилизация не допускаются.

Применимые стандарты:

EN 6060-1(медицинское электронное оборудование часть 1 – общие требования безопасности)

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

" - "

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

