
Перезаряжаемый аккумулятор Heine S5Z

Инструкция пользователя

Примечание: Перед использованием перезаряжаемого аккумулятора S5Z внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности

Область применения: Перезаряжаемый аккумулятор S5Z предназначена только для использования в Heine Accibox.

Общие требования безопасности:

- держите аккумулятор вдали от огня
- не модифицируйте и не разбирайте аккумулятор
- не роняйте ее и не подвергайте воздействию сильной вибрации
- не укорачивайте схему

Меры безопасности при использовании батарейки:

Избегайте повторно заряжать аккумулятор, если он не был разряжен. Идеальная температура окружающей среды при подзарядке 10 °C - 35 °C.

Настройка

- Отсоедините разъем.
 - Открутите винт над металлическим зажимом с помощью монетки или отвертки и откройте крышку.
 - После того, как вы отсоедините кабель, можно достать аккумулятор S5Z. Для этого не требуется никаких инструментов.
 - Воткните разъем кабеля в розетку на схеме.
 - Чтобы закрыть Accibox, вставьте два выступа на краях крышки в щели в корпусе прибора. Закройте крышку и закрепите винт.
 - Перезаряжайте Accibox в течение примерно 5 часов
-

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

