

Ламповая рукоятка HEINE



CE



## **Основные условия гарантии**

Вместо определенного законодательством гарантийного срока в 2 года, HEINE предоставляет гарантию на 5 лет с даты поставки товара с завода, на все свое оборудование (за исключением расходных материалов, например, лампочек, одноразовых изделий и аккумуляторов).

Мы гарантируем исправную работу инструмента при условии соблюдения правил, установленных производителем в руководстве по эксплуатации. При обнаружении неисправностей и поломок, возникших в результате фабричного брака в течение гарантийного периода, установленного законодательством и предприятием-изготовителем, изделие подлежит бесплатному ремонту. В случае предъявления претензии в течение гарантийного периода, установленного законодательством, покупатель должен представить доказательство того, что брак присутствовал в момент доставки товара. Гарантия, установленная законодательством и предприятием-изготовителем, не распространяется на повреждения, возникшие в результате закономерного износа, неправильной эксплуатации, использования деталей или запасных частей не торговой марки HEINE (в частности, лампочек, разработанных специально для HEINE по следующим критериям: изменение цвета в зависимости от температуры, долговечность, безопасность, качество оптики и работы). Кроме того, гарантия не распространяется на приборы, ремонт или модификация которых были выполнены лицами, не имеющими лицензии HEINE. Гарантийный ремонт не будет производиться также в случае нарушения клиентом правил эксплуатации. Все последующие претензии, в частности по устранению неисправностей деталей, не связанных напрямую с "HEINE", не рассматриваются. По вопросам ремонта просьба обращаться к поставщику, который вернёт нам изделие или направит их нашему уполномоченному представителю.

## **Инструкция пользователя**

### **Примечание:**

Перед использованием рукоятки HEINE внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

### **Меры безопасности:**

#### **Область применения:**

Ламповая рукоятка HEINE предназначена исключительно для использования с диагностическими фиброоптическими приборами HEINE.

#### **Общие требования безопасности:**

Ремонт может выполняться только квалифицированным персоналом.

**Требования безопасности при использовании:** не использовать рядом с взрывоопасными объектами.


### **Установка и использование**

- Вставьте вилку (1) ламповой рукоятки в розетку трансформатора 6 V и включите прибор. Если на соединительном кабеле есть переключатель (3), его можно использовать для включения и выключения, оставляя трансформатор включенным постоянно.
- Чтобы отсоединить вилку от трансформатора, вытащите ее, одновременно поворачивая.
- Чтобы прикрепить прибор: возьмите рукоятку одной рукой, а другой вставьте 3 штырька разъема в отверстия на головке прибора. Надавливайте на прибор, пока не раздастся щелчок.
- Чтобы отсоединить прибор: возьмите рукоятку одной рукой и поверните верхнее кольцо (4) против часовой стрелки. Затем другой рукой осторожно вытащите прибор.

### **Замена лампы**

- Вставьте держатель (5) лампы в рукоятку (7). Поверните байонетный коннектор влево и вытащите держатель лампы.

- Открутите лампу (6) от держателя и установите новую лампу такого же типа. Исправная работа прибора гарантируется только при использовании подходящей лампы HEINE.
- Вставьте держатель лампы в рукоятку и поверните вправо, чтобы закрепить байонетный коннектор.

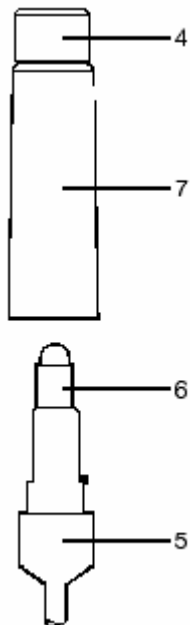

### **Очистка**

Отсоедините прибор от сети перед очисткой. Протрите тканью, смоченной в мыльном растворе.

### **Технические Спецификации**

#### **Галогенная лампа лампочной рукоятки:**

Номинальный вольтаж: 6 V

Потребление тока: 0.7 A

Срок службы: около 100 часов

Температура: около 2900 K

**Применимый стандарт: EN 60 601-1**

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>  
[info@heine-med.ru](mailto:info@heine-med.ru)

127 238, . , Дмитровское ш. 85  
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ( ) -

!

