

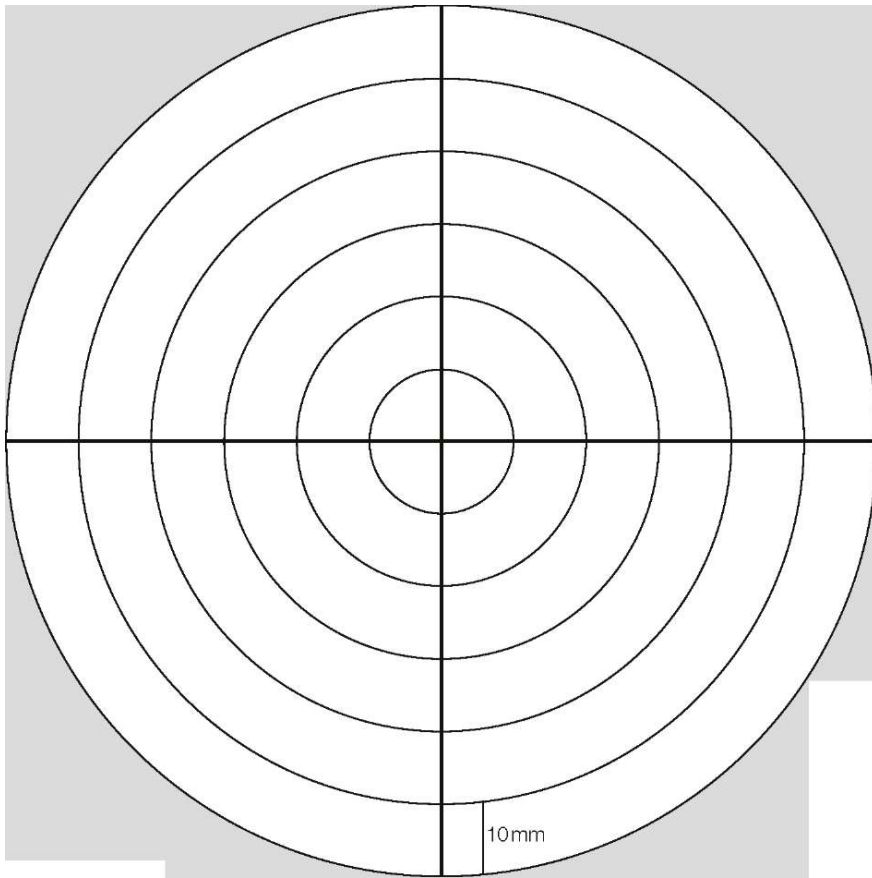
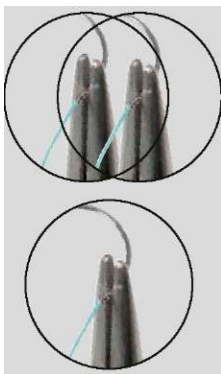


Настройка лупы при помощи мишени

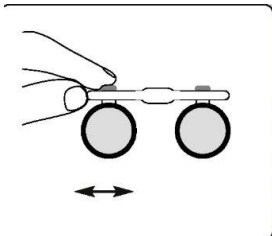

Биноклярные лупы HR-C/C 2.3
Биноклярные лупы HR-C/C 2.3

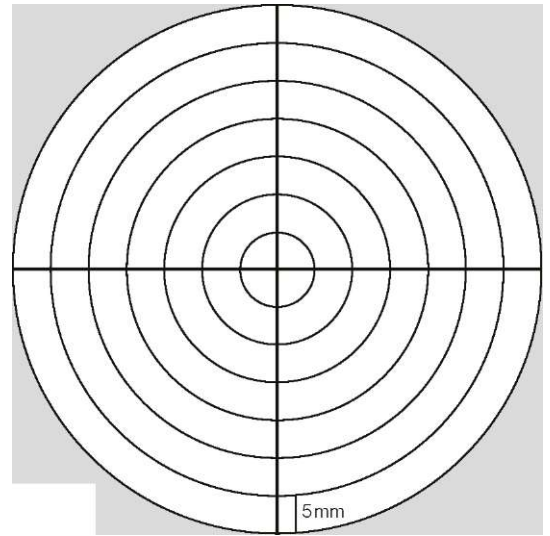

неправильная настройка

правильная настройка

Использование мишени для установки межзрачкового расстояния лупы.

Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции для настройки ваших окуляров:

1. Ослабьте винты окуляров на ваших лупах.
Лупы HR/HRP – серые вывинчивающиеся головки на верхней части оправы лупы.
Лупы HR-C/C 2.3 – маленькие металлические вывинчивающиеся головки на верхней части оправы лупы.
2. Наденьте лупы.
3. Поместите мишень на расстоянии от вас равному рабочему расстоянию до лупы.
4. Начните процедуру, закрыв левый глаз.
 - a. С закрытым левым глазом сдвиньте правый окуляр влево или вправо до тех пор, пока круг мишени равномерно не заполнит ваш обзор через лупу и визирная линия не будет находиться посередине вашего поля обзора.
 - b. Теперь откройте левый глаз и закройте правый глаз. Повторите эту процедуру.
 - c. Чередуйте закрытие каждого глаза так, чтобы круг мишени совпадал с центром каждого окуляра.
5. Откройте оба глаза и подтвердите настройку.
Ваше поле обзора через лупу должно быть одним полным кругом, без пересечений (как в микроскопе или в бинокль). Если вы обнаружили пересечение, пожалуйста, повторите все шаги от 1 до 4.
6. Затяните винты, зафиксировав в PD.
7. Запишите данные параметры, так как они могут быть использованы другим человеком.

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

