



Осветитель HEINE HL 1200

Примечание:

Перед использованием осветителя HEINE HL 1200 внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Внимание:

Не использовать вблизи от жидкостей.

При обслуживании используйте только идентичные запасные части.

Внимание: Взрывоопасно.

Не используйте вблизи от огнеопасных анестезирующих веществ. Работа с прибором должна проводиться только в помещении.

Правила использования: Галогенный осветитель HL 1200 предназначен для освещения в клиниках и кабинетах для обследования. Он может оставаться включенным

в течение длительного периода.

Требования безопасности: Не вскрывайте корпус трансформатора. Любой ремонт, кроме замены лампы, должен проводиться квалифицированным персоналом. Использовать HL 1200 можно только, когда он полностью собран.

Сборка: При сборке HL 1200 держатель (1) должен быть установлен вертикально, не горизонтально или наклонно. (См. инструкцию по инсталляции). Убедитесь, что зажим закреплен надежно. Не закрывайте вентиляционную решетку в корпусе трансформатора.

Меры безопасности при использовании прибора: Вольтаж сети должен совпадать с вольтажом, указанным на идентификационной плате. Осветитель HL 1200 можно использовать, только с одетой на головку осветителя защитной крышкой (6). Головку иллюминатора нельзя закрывать фольгой или тканью.

Осветитель нельзя использовать рядом с взрывоопасными веществами. Не светите пациенту прямо в глаза. Осветитель должен находиться на расстоянии не менее 20 см до объекта.

Сборка/ Инсталляция

Инструкция и материалы для инсталляции включены в упаковку.

- a) Крепление на стену (инструкция S-249.07.01)
- b) Зажим (инструкция S-249.23.01)
- c) Мобильный стенд (инструкция S-249.33.01)

Подключите кабель к сети только после завершения сборки.

Руководство по использованию

Световод осветителя HL1200 состоит из двух гибких (2, 4) и одной неподвижной частей (3).

Подвижные части можно нагнуть в любом направлении на угол до 90° (2) или 180° (4). Не сгибайте их во избежание износа. Благодаря держателю (1) мобильность световода увеличивается на 180°.

При позиционировании света держите прибор за гибкую подвижную часть перед головкой осветителя (5).

Чтобы включить прибор, нажмите на выключатель (10).

Замена лампы

- Отсоедините кабель.
- Подождите, пока лампа остынет.
- Большим и указательным пальцами нажмите на две отметки (7) на крышке и передвиньте крышку (6) наружу и вниз.
- Возьмите лампу большим и указательным пальцами и достаньте ее из гнезда.
- При установке новой лампы убедитесь, что контактные штырьки не погнуты.
- Не прикасайтесь к защитной крышке.
- Что вернуть крышку на место, установите зажим (8) в маркированное отверстие (1) на головке осветителя и нажимайте на крышку (6), пока второй зажим (8) не встанет на место.

Примечание: Безопасная и надежная работа осветителя гарантируется только в случае, если используются фирменные лампочки HEINE.

Замена предохранителя

Отсоедините вилку кабеля! Предохранители располагаются в отделении для предохранителей. Используйте только предохранители, указанные в технических спецификациях.

Очистка

Отсоедините вилку кабеля! Подождите, пока прибор не остынет.

Для очистки HL1200 используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде или любом неагрессивном растворе.

Технические спецификации

Входные параметры	Вольтаж 115 В~/ 60Гц 240В/50/60 Гц	Предохранитель 2 x 400 mA slow 2 x 200 mA slow
(см. идентификационную плату)		
Потребление энергии:	40 VA	
Выходные параметры:	12 В/ 20 Вт	
Лампы:	12 В / 20 Вт отражающая лампа холодного света	
Угол луча света:	10°	
Срок службы лампы:	ок. 4000 часов	

Температура:	ок. 3200 К
Использование:	непрерывное (температура окруж. среды до +40 °С)
Классификация:	Тип В
Вес с настенным креплением:	2.4 кг
Вес зажима:	0.2 кг
Вес мобильного стенда:	3.2 кг
Длина гибкой части:	114 см
Международная защита:	IP 20
Оборудование:	Класс I

Аксессуары

Зажим	J-00.27.010
Мобильный стенд (не показан)	Y-96.50.004
Лампа-рефлектор 12 V / 20 W	J-05.27.075

Применимые стандарты: EN 60 601-1 (1990)

Product Name: HL 1200

	Voltage	Fuse
Input	230V	2xT200mA
Power consumption	12V/20W	
Lamp	Halogen reflector	
Classification	Class I, Medical Device Directive 93/42/EEC	
Dimensions	Length of flex. arm: 1140mm Diameter of head: 75mm	
Weight	2436g	
Temperature	>50°C	
Color Temperature	3200K	
Environment Temperature	10°C to 40°C	

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

”

-

”

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

