


HEINE Universal- Halogenleuchte HL 5000

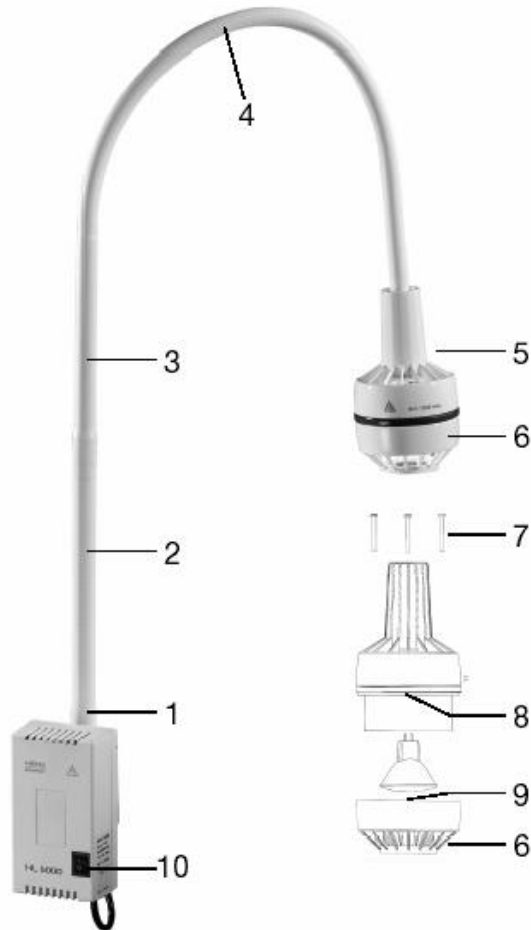

HEINE
OPTOTECHNIK

CE 93/42/EWG/CEE/EEC

Осветитель HEINE HL 5000

Примечание:

Перед использованием осветителя HEINE 5000 внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Внимание:

Не использовать вблизи от жидкостей.

При обслуживании используйте только идентичные запасные части.

Внимание: Взрывоопасно.

Не используйте вблизи от огнеопасных анестезирующих веществ. Работа с прибором должна проводиться только в помещении.

Правила использования:

Галогенный осветитель HL 5000 предназначен для освещения в клиниках и кабинетах для обследования. Он может оставаться включенным в течение длительного периода.

Требования безопасности:

Не вскрывайте корпус трансформатора. Любой ремонт, кроме замены лампы, должен проводиться квалифицированным персоналом. Использовать HL 5000 можно только, когда он полно-

стью собран.

Сборка: Осветитель HL 5000 можно установить в любое положение. Убедитесь, что зажим закреплен надежно. Не закрывайте вентиляционную решетку в корпусе трансформатора.

Меры безопасности при использовании прибора: Вольтаж сети должен совпадать с вольтажом, указанным на идентификационной плате. Осветитель HL 5000 можно использовать, только с одетой на головку осветителя защитной крышкой (6). Головку иллюминатора нельзя закрывать фольгой или тканью.

Осветитель нельзя использовать рядом с взрывоопасными веществами. Не светите пациенту прямо в глаза. Осветитель должен находиться на расстоянии не менее 20 см до объекта. Не оставляйте включенный осветитель без присмотра.

Сборка/ Инсталляция

Инструкция и материалы для инсталляции включены в упаковку.

- a) Крепление на стену (инструкция S-249.07.01)
- b) Зажим (инструкция S-249.23.01)
- c) Мобильный стенд (инструкция S-249.33.01)

Подключите кабель к сети только после завершения сборки.

Руководство по использованию

Световод осветителя HL 5000 состоит из двух гибких (2, 4) и одной неподвижной частей (3).

Подвижные части можно нагнуть в любом направлении на угол до 90° (2) или 180° (4). Не сгибайте их во избежание износа. При позиционировании света держите прибор за гибкую подвижную часть перед головкой осветителя (5).

Чтобы включить прибор, нажмите на выключатель (10).

Замена лампы

- Отсоедините кабель.
- Подождите, пока лампа остынет
- Открутите три винта за головкой осветителя (7) и снимите крышку (6).
- Возьмите лампу большим и указательным пальцами и достаньте ее из гнезда.
- При установке новой лампы убедитесь, что контактные штырьки не погнуты. Не прикасайтесь к защитной крышке.
- Верните крышку на место, убедитесь, что выступ (8) вошел в отверстие (9).
- Прикрутите три винта, чтобы зафиксировать крышку (6).

Примечание: Безопасная и надежная работа осветителя гарантируется только в том случае, если используются фирменные лампочки HEINE.

Замена предохранителя

Отсоедините вилку кабеля! Предохранители располагаются в отделении для предохранителей. Используйте только предохранители, указанные в технических спецификациях.

Очистка

Отсоедините вилку кабеля! Подождите, пока прибор не остынет.

Для очистки HL 5000 используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде или любом неагрессивном растворе.

Технические спецификации

	Вольтаж	Предохранитель
Входные параметры:	100 В~ 50/60 Гц	2 x 1,25 A slow
(см. Идентификационную плату)	120 В~ 50/60 Гц	2 x 1,25 A slow

	127 В~ 50/60 Гц	2 x 1,25 A slow
	230 В~ 50/60 Гц	2 x 630 mA slow
	240 В~ 50/60 Гц	2 x 630 mA slow
Потребление энергии:	70 VA	
Выходные параметры:	12 В / 50 Вт	
Лампа:	12 В / 50 Вт	
Угол луча света:	10 °	
Срок службы лампы:	ок. 4000 часов	
Температура:	около 3100 К	
Использование:	непрерывное (температура окруж. среды до +40)	
Классификация:	Тип В	
Вес с креплением на стену:	2.6 кг	
Вес зажима:	0.2 кг	
Вес мобильного стенда:	3.2 кг	
Длина гибкой части:	114 см	
Международная защита:	IP 20	
Оборудование:	Класс I	

Аксессуары

Зажим	J-00.27.010
Мобильный стенд (не показан)	Y-96.50.004
Галогенная лампа 12 V / 50 W	J-05.27.111

Применимые стандарты: **EN 60 601-1 (1990)**
EN 60 601-2-41 (2000)

Product Name: HL 5000

	Voltage	Fuse
Input	230V	2xT630mA
Power consumption	12V/50W	
Lamp	Halogen reflector	
Classification	Class I, Medical Device Directive 93/42/EEC	
Dimensions	Length of flex. arm: 1140mm Diameter of head: 95mm	
Weight	2600g	
Temperature	<50°C	
Color Temperature	3100K	
Environment Temperature	10°C to 40°C	

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

”

-

”

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

