



Ларингоскоп HEINE FlexTip+®

Руководство пользователя.

Примечание:

Перед использованием ларингоскопа HEINE FlexTip+® внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности

Область применения:

Ларингоскоп HEINE FlexTip+® предназначен исключительно для эндотрахеальной интубации. Они должны использоваться только авторизованным персоналом, обученным проведению эндотрахеальной интубации.

Требования безопасности:

Используйте только рукоятки с зеленой идентификационной отметкой.

Не используйте рукоятку F.O. вместе с HEINE FlexTip+®.

Не сгибайте подвижные части и рычажной механизм и не применяйте по отношению к ним излишнюю силу.

Внимание: Не используйте вблизи от сильного магнитного поля.

Общие меры безопасности:

Во избежание заражения, после каждой интубации ларингоскоп следует очистить и дезинфицировать или стерилизовать (см. инструкции по очистке). Если прибор часто используется, рекомендуется держать под руками запасной прибор и несколько запасных ламп и батареек.

Использование прибора

Следуйте данным инструкциям при использовании подвижного наконечника клинка, чтобы не нанести вред пациенту.

- Перед использованием убедитесь, что на приборе нет повреждений, царапин и т.п.
- Прикрепите клинок к рукоятке и приведите его в рабочее положение.
- Убедитесь, что свет достаточно яркий. (проверьте батарейки!).
- Во время интубации держите ларингоскоп за рукоятку, не нажимайте на рычаг.
- Когда наконечник клинка окажется в ямке надгортанника, осторожно нажмите на рычаг большим пальцем, чтобы поднять надгортанник.
- Отпустите рычаг перед тем, как извлечь клинок.

Обслуживание и очистка фиброоптических ларингоскопов

Начальная очистка

Все осадки нужно удалить немедленно после использования, для этого очистите клинок пластиковой щеткой в мыльной воде. Это необходимо, чтобы избежать непоправимых повреждений вследствие высыхания остатков загрязнений на ларингоскопе.

Ручная очистка и дезинфекция

Используйте только очистители, рекомендованные производителем для оптических приборов. В точности следуйте инструкциям производителя по концентрации и длительности очистки. Все химические растворы следует регулярно обновлять во избежание коррозии. После очистки промойте прибор деминерализованной водой.

Внимание: Применение неподходящих очистителей и дезинфицирующих растворов, таких как дезинфекторы одежды или поверхностей, может нанести непоправимый вред клинку и фиброоптическому узлу.

Машинная очистка и дезинфекция

Рекомендуется очистка в автоматическом стерилизаторе при температуре до 95°C. Строго следуйте инструкциям производителя по концентрации и продолжительности циклов очистки и сушки. Ультразвуковая очистка запрещена.

Стерилизация

Ларингоскопы нужно очистить и высушить перед стерилизацией.

Разрешено автоклавирование при параметрах до 134 °C/3 бар продолжительностью не более пяти минут. Возможна также газово-плазменная стерилизация (STERRAD). Частое продолжительное автоклавирование может привести к ухудшению светопропускательной способности ларингоскопа.

Аксессуары и запасные части

Клинок HEINE FlexTip+® F.O. MAC 3	F-00.22.313
Клинок HEINE FlexTip+® F.O. MAC 4	F-00.22.314
Батареечная рукоятка F.O. 2,5 V	F-01.22.860
Перезаряжаемая рукоятка F.O. NT 3,5 V	F-02.22.863
Малая батарейная рукоятка F.O.	F-01.22.812

Стандарты:	EN 1819: 1997
	ISO 7376-3: 1996

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

”

-

”

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

