

Операционный Отоскоп HEINE

Инструкция пользователя

Перед работой с отоскопом внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Область применения:

Операционный отоскоп HEINE предназначен для исследования и операции уха.

Требования безопасности:

Используйте только рукоятки, предназначенные для медицинских приборов. Если установлен адаптер для воронок, то перед тем, как вставлять отоскоп в ухо, к нему нужно обязательно прикрепить воронку.

Воронки:

Многоразовую ушную воронку нужно прикрепить к отоскопу так, чтобы штырек вошел в байонетное отверстие. Поверните воронку вправо, чтобы зафиксировать ее.

Чтобы прикрепить одноразовую воронку, надавите на нее.

Адаптер воронок

Одноразовые воронки AllSpec прикрепляются к отоскопу при помощи адаптера:

- Прикрепите адаптер к отоскопу так, чтобы штырек вошел в отверстие. Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
- Прикрепите воронку к адаптеру. Внутренний контакт должен находиться в отверстии в корпусе адаптера. Осторожно поверните воронку по часовой стрелке.

Увеличительная оптика

Линза, которую можно прикрепить к отоскопу, дает увеличение примерно 2,5 х.

Линзу можно поворачивать для работы с прибором.

Замена лампочки

Внимание: Исправная работа инструмента гарантируется только в случае использования фирменных ламп HEINE.

- Открутите лампу.
- Убедитесь, что новая лампа имеет вольтаж, соответствующий вольтажу рукоятки или трансформатора.

Очистка и стерилизация

Можно использовать газовую стерилизацию, хотя обычно достаточно очистки с использованием неагрессивных растворов.

Пластик SANALON® S, из которого сделаны ушные воронки, можно очищать и дезинфицировать обычными растворами, а также кипятить. Возможна стерилизация при температуре до 140 °C.

Воронки AllSpec и одноразовые воронки Uni-Spec предназначены только для одноразового использования. Не пытайтесь очистить их, так как вы можете испортить воронку и нанести вред пациенту.

Запасные части и аксессуары:

Галогенная лампа XHL 2,5 V	X-01.88.037
Галогенная лампа XHL 3,5 V	X-02.88.049
Защита для лампы отоскопа	B-00.11.212
Инсуффлятор	B-00.11.240
Воронки SANALON® S (многоразовые)	
1 комплект = 6 шт.	B-00.11.221
Раздвижная назальная воронка	B-00.11.231
Симметричная раздвижная универсальная воронка	B-00.11.239

Одноразовая ушная воронка UniSpec:

1 комплект = 1000 шт., 2,5 мм дистальный диам.	B-00.11.242
то же 4,0 мм дистальный диам.	B-00.11.241

Одноразовые воронки AllSpec:

1 комплект = 1000 шт., 2,5 мм дистальный диам.	B-00.11.128
то же 4,0 мм дистальный диам.	B-00.11.127
Адаптер	B-00.11.306

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

