

# Проктоскоп HEINE Mader

## Руководство пользователя.

### Примечание:

Перед использованием проктоскопа HEINE внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

### Меры безопасности:

#### Область применения:

Проктоскопы HEINE Mader предназначены только для обследования и лечения анального прохода.

#### Требования безопасности при использовании:

Используйте только источники света, предназначенные для медицинских приборов.

## Использование прибора

- Прикрепите прибор к рукоятке.
- Вставьте трубку до упора.
- Поверните трубку, чтобы установить смотровое окошко в желаемое положение. Закрепите трубку с помощью винта (1).

## Установка зеркала

Вставьте зеркало (3) в трубку так, чтобы штырек (5) вошел в отверстие (4). Прикрутите зеркало.

## Замена лампы

**Примечание: Исправная работа прибора гарантируется только при использовании фирменных ламп HEINE.**

Открутите лампу за (2). Ввинтите новую лампу.

## Очистка и Стерилизация

**Не погружайте головку прибора в очистительные растворы.**

**Избегайте появления царапин на зеркале.**

### 1. Очистка

Очищайте сразу же после использования, чтобы избежать высыхания осадков. Отсоедините трубку от головки прибора и открутите зеркало (3).

– Протрите прибор тканью, смоченной в спирте или детергенте.

– Очистите трубку и зеркало мягкой щеткой и водой или раствором детергента.

### 2. Дезинфекция

После очистки, как в 1.

– Протрите дезинфицирующим раствором.

– Погрузите трубку и зеркало в дезинфицирующий раствор.

– Высушите перед использованием.

### **3. Стерилизация**

- Проведите газовую стерилизацию с оксидом этилена.
- Трубку и зеркало можно автоклавировать.

### **Аксессуары и запасные части**

Запасная галогенная лампа XHL 2,5 V

**X-01.88.040**

Запасная галогенная лампа XHL 3,5 V

**X-02.88.051**

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>  
[info@heine-med.ru](mailto:info@heine-med.ru)

127 238, . , Дмитровское ш. 85  
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ( ) -

!

