

HEINE® iC1 Quick Start Guide



Download the HEINE iC1 App in the AppStore.
Download der HEINE iC1 App im AppStore.



Place the iPhone* in the appropriate mobile phone case until it engages. Please make sure the camera is in the correct position.
iPhone in die passende Schale einsetzen bis es einrastet. Darauf achten, dass die Kamera an der richtigen Position ist.*




Attach the mobile phone case to the HEINE iC1 until it engages.
Einsetzen der Adapterschale auf das HEINE iC1, bis es einrastet.



Switch on.
Einschalten.



The device automatically starts in polarisation mode. The toggle function allows you to alternate between polarised images and immersion image.
Das Gerät startet im Polarisationsmodus. Mit der Toggle-Funktion kann zwischen Polarisations- und Immersionsaufnahme umgeschaltet werden.

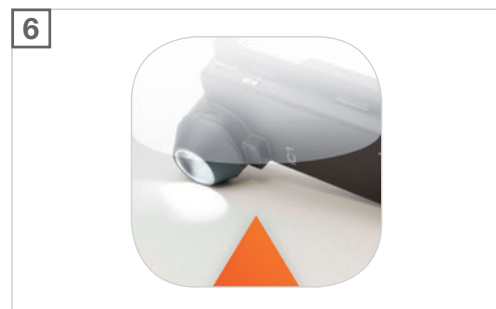

Start the HEINE iC1 App on your iPhone*.
Starten Sie auf ihrem iPhone die HEINE iC1 App.*



Press your thumb through the opening of the mobile phone case to disengage the iPhone*.
Mit dem Daumen durch die Aussparung das iPhone aus der Schale drücken.*



Charging the HEINE iC1 with the supplied USB cord.
Laden des HEINE iC1 mit dem mitgelieferten USB-Kabel.

* iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Cleaning and Disinfection

Reinigung und Desinfektion



Please note: To prevent damage to the device, do not spray disinfectants or detergents directly onto the contact plate.

Bitte beachten Sie, dass Desinfektions- und Reinigungsmittel nicht direkt auf die Kontaktscheibe aufgesprüht werden dürfen um Schäden am Gerät zu vermeiden.

ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» Москва
Официальный импортер и дистрибьютор
Heine Optotechnik GmbH & Co. KG на территории РФ.

+7 (495) 902-59-26
+7 (495) 518-55-99

medtextst@yandex.ru
<https://heine-med.ru>

