

---

## Депрессор языка Heine с эжектором

### Инструкция пользователя

**Примечание:** Перед использованием депрессора языка внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

#### Меры безопасности:

##### Область применения:

Депрессор языка HEINE предназначен для освещения рта и горла вместе с установленным шпателем или без него. Используйте только одноразовые шпатели HEINE.

##### Требования безопасности при использовании:

Используйте только рукоятки, предназначенные специально для медицинского оборудования. Избегайте контакта депрессора со слизистой или с поврежденной кожей.

#### Установка шпателей

Вставьте одноразовый шпатель HEINE в отверстие (3) так, чтобы защелка вошла в прямоугольную выемку на шпателе.

Чтобы достать шпатель после использования, нажмите на триггер (4).

#### Замена лампочки

Открутите крышку лампочки (1) от головки и вытащите использованную лампочку (2). Вставьте новую лампочку и закрутите крышку (1).

**Примечание:** исправная работа данного прибора гарантируется только при использовании фирменных ламп HEINE.

#### Очистка и стерилизация

Для очистки протрите депрессор спиртом. Можно провести газовую стерилизацию. Автоклавирование запрещено.

#### Запасные части и аксессуары

Осветитель	<b>B-00.12.308</b>
Галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V	<b>X-01.88.037</b>
Галогенная лампа HEINE XHL 3,5 V	<b>X-02.88.049</b>
Одноразовый шпатель (упаковка 100шт.)	<b>B-00.12.304</b>

---

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>  
[info@heine-med.ru](mailto:info@heine-med.ru)

127 238, . , Дмитровское ш. 85  
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ( ) -

!

