


HEINE BETA 200 / K180 Отоскоп

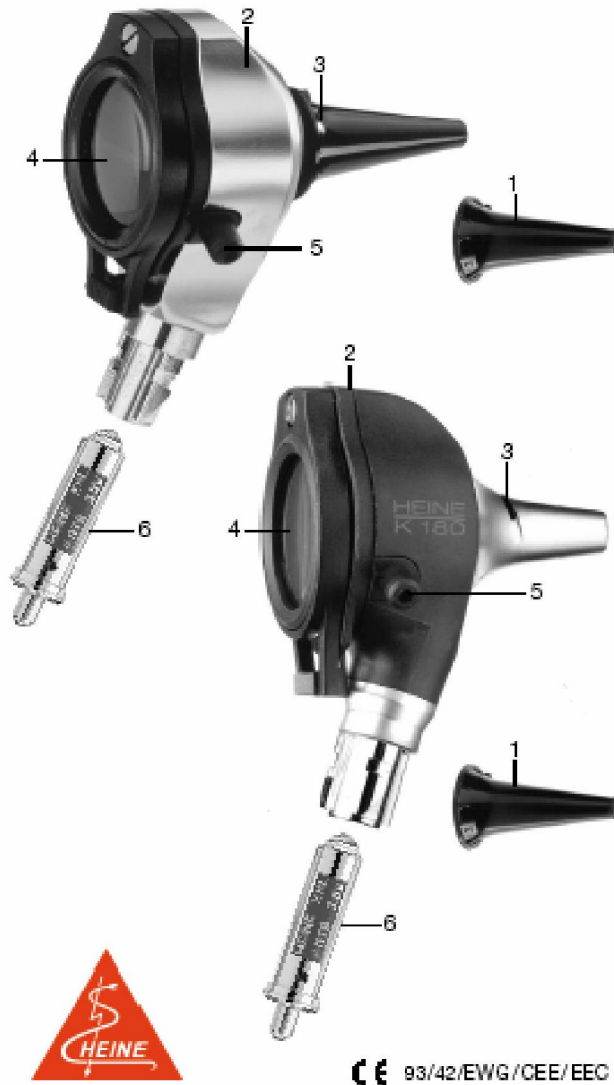

HEINE
OPTOTECHNIK

CE 93/42/EWG/CEE/EEC

Отоскоп HEINE BETA 200/ K 180 Инструкция пользователя

Перед работой с отоскопом внимательно прочитайте инструкцию.

Меры безопасности:

Область применения:

Отоскопы HEINE Beta 200 и HEINE K 180 предназначены для исследования наружного уха и общего неинвазивного исследования.

Требования безопасности:

Используйте только рукоятки и источники питания, предназначенные для медицинских приборов. Обязательно прикрепите к отоскопу воронку перед тем, как вставлять его в ухо. При проведении пневматического теста нажимайте на отоскоп очень осторожно.

Инструкция

Обязательно прикрепите к отоскопу воронку SANALON S или All-Spec перед тем, как вставлять его в ухо.

- Прикрепите воронку (1) к головке отоскопа (2) так, чтобы выступ вошел в отверстие (3). Поверните воронку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее.

- При обычном обследовании смотровое окошко (4) должно быть закрыто (увеличение 3х).
- Для проведения пневматического теста прикрепите инфляционный порт (5).
- Для облегчения инструментального вмешательства поверните смотровое окошко в сторону (4) так, чтобы можно было работать с увеличением.

Общее освещение:

Отоскоп можно использовать с воронкой или без нее для универсального освещения, например ротовой полости или кожи. Избегайте контакта с чувствительной или поврежденной кожей.

Замена лампочки

Внимание: Исправная работа инструмента гарантируется только в случае использования фирменных галогенных ламп HEINE XHL.

Отсоедините отоскоп от рукоятки и вытащите использованную лампочку (6).
Вставьте новую лампу.

Очистка и стерилизация

Отоскоп: Протрите внешнюю поверхность мягкой тканью, внутреннюю – ватным тампоном, при необходимости смоченным спиртом. Газовая стерилизация запрещена. Не погружайте в жидкость.

Многоразовые воронки SANALON S: Для очистки, дезинфекции или стерилизации используйте любой обычный метод. Можно применять стерилизацию при температуре до 170С.

Воронки AllSpec предназначены только для одноразового использования. Не пытайтесь очистить их, так как вы можете испортить воронку и нанести вред пациенту.

Запасные части и аксессуары:

Инсуффляционная груша	B-00.11.240
Многоразовые воронки SANALON S 1 упаковка = 4 шт.	B-00.11.111
Одноразовые воронки AllSpec упаковка 1000 шт., дистальный диаметр 2,5 мм	B-00.11.128
Одноразовые воронки AllSpec упаковка 1000 шт., дистальный диаметр 4 мм	B-00.11.127
Диспенсер воронки AllSpec	B-00.11.148
Запасная галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V	X-01.88.077
Запасная галогенная лампа HEINE XHL 3,5 V	X-02.88.078



B-00.11.128

B-00.11.127



B-00.11.145

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

