



## Офтальмоскоп HEINE К 180 Руководство пользователя.

**Примечание:** Перед использованием офтальмоскопа HEINE К 180 внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

### Меры безопасности:

**Область применения:** Офтальмоскоп HEINE К 180 предназначен для обследования глаза.


**Требования безопасности:** Используйте только рукоятки или источники питания, предназначенные для медицинских приборов. Вольтаж сети должен совпадать с вольтажом лампочки.

### Использование прибора

Для удобства пользователя прибор нужно держать так, чтобы большой палец находился на упоре для большого пальца (5). Такое положение позволяет работать с диском линз (1) и переключателем фильтров (2) указательным пальцем той же руки. Выбранное значение коррекции отображается в окошке (3) (плюс- зеленый, минус – красный).

### Очистка и стерилизация

Для очистки корпуса прибора используйте ткань, смоченную спиртом. Протрите стеклянные диски ватным тампоном, смоченным в спирте. Кончик тампона нужно перемещать по спирали от центра к краю окошка.

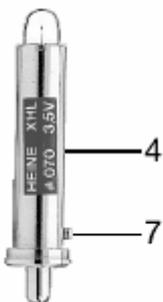

### Замена лампочки

Отсоедините офтальмоскоп от рукоятки и вытащите лампочку (4). Протрите новую лампочку мягкой тканью. Вставьте новую лампу в прибор так, чтобы штырек (7) вошел в отверстие (6).

---

## Запасные части

**Примечание: Правильная работа прибора гарантирована только в том случае, если используются фирменные галогенные лампы HEINE.**

Галогенная лампа HEINE XHL для офтальмоскопа 2,5 V

**X-01.88.084**

Галогенная лампа HEINE XHL для офтальмоскопа 3,5 V

**X-02.88.086**

---

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>  
[info@heine-med.ru](mailto:info@heine-med.ru)

127 238, . , Дмитровское ш. 85  
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ( ) -

!

