


Батарейная рукоятка HEINE BETA SLIM Перезаряжаемая рукоятка HEINE BETA SLIM

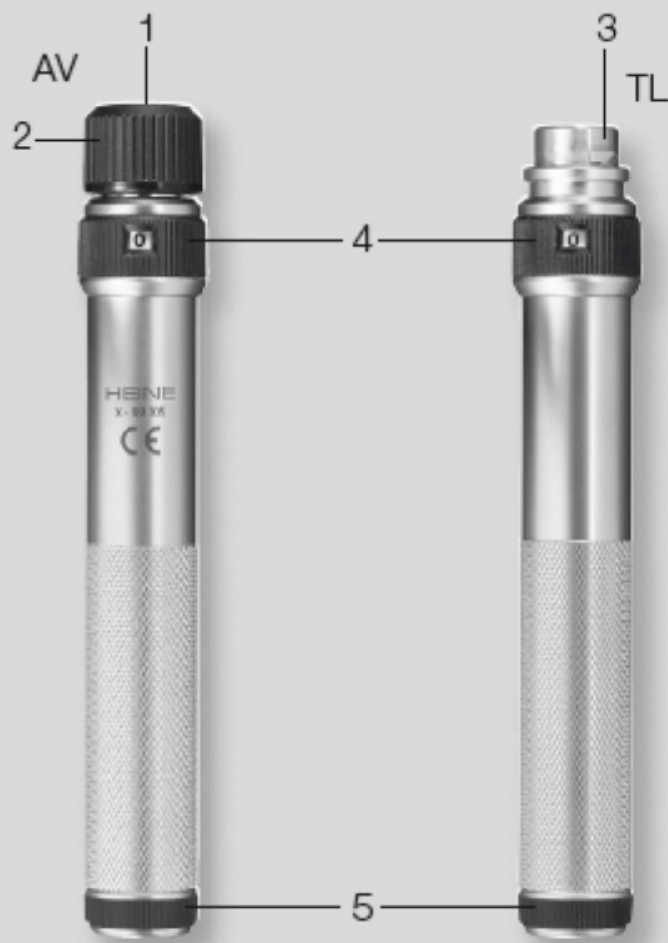

Основные условия гарантии

Вместо определенного законодательством гарантийного срока в 2 года, HEINE предоставляет гарантию на 5 лет с даты поставки товара с завода, на все свое оборудование (за исключением расходных материалов, например, лампочек, одноразовых изделий и аккумуляторов).

Мы гарантируем исправную работу инструмента при условии соблюдения правил, установленных производителем в руководстве по эксплуатации. При обнаружении неисправностей и поломок, возникших в результате фабричного брака в течение гарантийного периода, установленного законодательством и предприятием-изготовителем, изделие подлежит бесплатному ремонту. В случае предъявления претензии в течение гарантийного периода, установленного законодательством, покупатель должен представить доказательство того, что брак присутствовал в момент доставки товара. Гарантия, установленная законодательством и предприятием-изготовителем, не распространяется на повреждения, возникшие в результате закономерного износа, неправильной эксплуатации, использования деталей или запасных частей не торговой марки "HEINE" (в частности, лампочек, разработанных специально для "HEINE" по следующим критериям: изменение цвета в зависимости от температуры, долговечность, безопасность, качество оптики и работы). Кроме того, гарантия не распространяется на приборы, ремонт или модификация которых были выполнены лицами, не имеющими лицензии "HEINE". Гарантийный ремонт не будет производиться также в случае нарушения клиентом правил эксплуатации. Все последующие претензии, в частности по устранению неисправностей деталей, не связанных напрямую с "HEINE", не рассматриваются. По вопросам ремонта просьба обращаться к поставщику, который вернет нам изделие или направит их нашему уполномоченному представителю.

Инструкции по применению

Перед использованием рукояток для ларингоскопа HEINE BETA внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.



В соответствии с местными постановлениями данный продукт должен быть утилизирован в качестве отдельного электронного устройства.

Меры безопасности

Область применения:

батареечные и перезаряжаемые рукоятки предназначены исключительно для использования с медицинскими диагностическими приборами. Эффективность работы рукояток может быть гарантирована только в случае использования оригинальных приборов и запасных частей HEINE.

Общая безопасность:

все ремонтные работы должны проводиться квалифицированным специалистом.

Безопасность при использовании:

Для использования батарейечной рукоятки HEINE BETA SLIM требуется две сухих батарейки LR6 (AA).

Для использования перезаряжаемой рукоятки HEINE BETA SLIM требуется зарядное устройство HEINE NT200 или NT300 с аккумулятором на 3.5V(M3Z).

Установка и использование

Автоматический разъем:

Установка прибора:

- установите головку прибора, вставив ее сверху, так чтобы соединительный наконечник состыковался с пазами на рукоятке. Нажмите на головку рукоятки до ее фиксации со слышимым щелчком.

Удаление прибора:

- снимите головку прибора, крутя рифленое кольцо при помощи большого и указательного пальцев руки. Снимите головку другой рукой.

Разъем с поворотным замком:

Установка прибора:

- держите рукоятку в одной руке, соедините имеющиеся в ней выступы с углублениями в головке, нажмите и поверните рукоятку по часовой стрелке до ее полной фиксации.

Удаление прибора:

- для снятия головки поверните ее против часовой стрелки и удалите.

Время зарядки

Для NT 200:

M3Z (3,5 V, NiMH) = около 14ч.

Зарядное устройство NT 300 указывает пользователю, когда прибор полностью заряжен.

Светящееся кольцо горит постоянно.

M3Z (3,5 V, NiMH) = около 4ч.

Регулировка яркости

Для включения поверните колесо (4) влево (по часовой стрелке). В позиции 1 установлен самый высокий уровень яркости. В позиции 0 и 1 вы можете установить любой уровень яркости.

Замена батареек

Открутите нижнюю крышку (5) и достаньте использованные батарейки разряженного аккумулятора.

Очистка и техническое обслуживание

Мы рекомендуем протирать внешние части рукояток BETA SLIM при помощи дезинфицирующей салфетки. Эту процедуру должен выполнять только квалифицированный специалист.

Не бросайте прибор и не подвергайте воздействию сильных вибраций.

Не автоклавируйте прибор.

Стерилизация газом допускается только после извлечения аккумулятора из прибора.

Применимые стандарты

IEC 60601-1

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

