


Большая батарейечная рукоятка HEINE

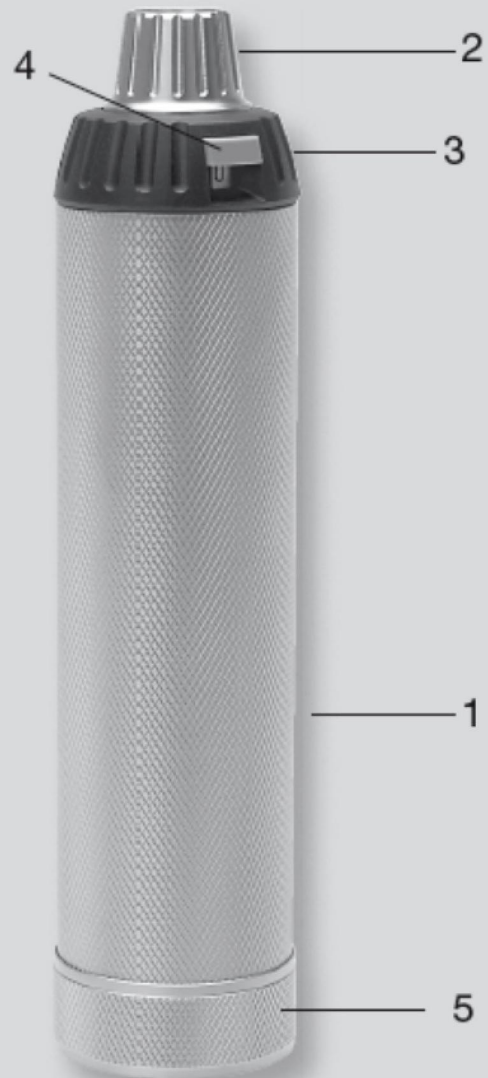

Инструкции по применению

Перед использованием рукояток для ларингоскопа HEINE внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.



В соответствии с местными постановлениями данный продукт должен быть утилизирован в качестве отдельного электронного устройства.

Меры безопасности

Область применения:

Большая рукоятка HEINE предназначена исключительно для использования с медицинскими диагностическими приборами с лампой освещения.

Безопасность при использовании:

Большая рукоятка HEINE может использоваться только с щелочно-марганцевыми батарейками IEC LR20/D.

Эксплуатация

Подключение прибора:

Установите прибор, вставив его сверху, так чтобы соединительный наконечник состыковался с пазами на рукоятке (2). Нажмите на головку рукоятки до ее фиксации со слышимым щелчком.

Отключение прибора:

Снимите прибор, крутя рифленое кольцо (2) при помощи большого и указательного пальцев руки. Снимите прибор другой рукой.

Регулировка яркости

Для включения поверните колесо (3) влево (по часовой стрелке). Поверните рукоятку (4) в ту же сторону. В позиции 1 установлен самый высокий уровень яркости. В позиции 0 и 1 вы можете установить любой уровень яркости.

Замена батареек

Открутите нижнюю крышку (5) и извлеките батарейки.

Очистка и техническое обслуживание

Протрите внешние части прибора мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, воде или дезинфицирующем средстве, разрешенном для использования с медицинскими изделиями.

Замачивание, автоматическая очистка/дезинфекция и стерилизация паром запрещены.

Важное замечание: попадание жидкости может нанести вред электрической системе и вызвать неисправность рукоятки.

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

