



## **Зарядное устройство NT 200 HEINE и перезаряжаемые рукоятки Инструкция пользователя**

### **Примечание:**

Перед установкой и инсталляцией HEINE NT 200 внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

### **Меры безопасности**

#### **Внимание:**

Не используйте вблизи от жидкостей. Для обслуживания применяйте только подходящие запасные части.

#### **Внимание:**

Взрывоопасно.  
Не использовать вблизи от воспламеняемых анестетиков. Использовать только в помещении.

### **Область применения:**


NT 200 предназначен только для зарядки перезаряжаемых батареек HEINE.

### **Общие меры безопасности:**

Не вскрывайте корпус трансформатора. Ремонт, кроме замены перезаряжаемой батарейки, должен проводиться только квалифицированным персоналом.

### **Меры безопасности при использовании прибора:**

Вольтаж, указанный на идентификационной плате трансформатора, должен соответствовать вольтажу сети. Не используйте NT 200 вблизи от взрывоопасных веществ.

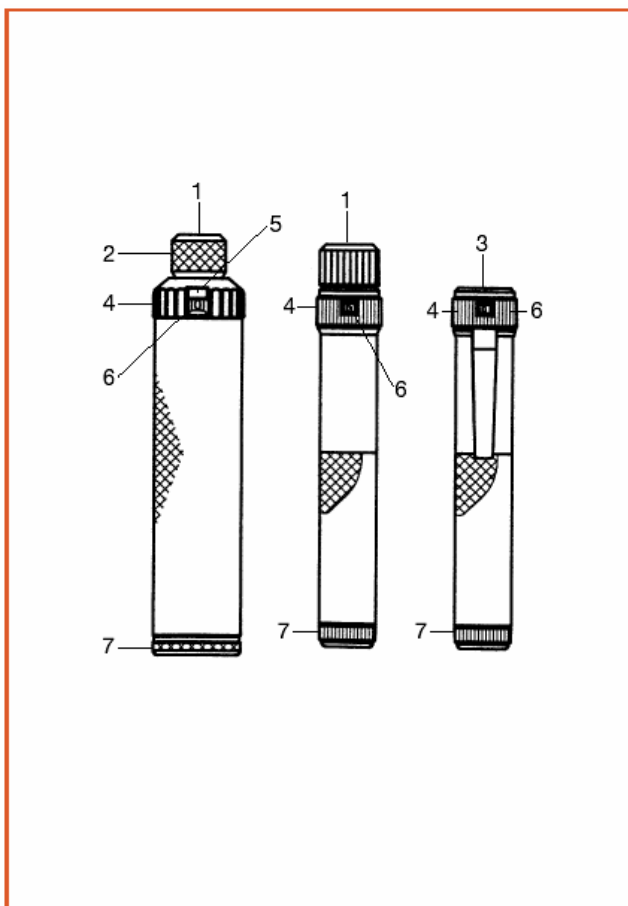

## Общая информация

### Инсталляция и использование

- Подключите трансформатор к сети.
- Новые рукоятки в первый раз нужно заряжать не менее 12 часов.
- При использовании NT 200 батарейки всегда находятся в хорошем состоянии, вне зависимости от размера рукоятки.
- Перезаряжаемые рукоятки нужно заменять и хранить в зарядном устройстве.
- Высвечивающийся зеленый индикатор перед ячейкой для зарядки указывает на то, что идет процесс подзарядки.
- Если вторая ячейка для зарядки не используется, ее можно закрыть крышкой для защиты от пыли, крышка поставляется вместе с прибором.

## Рукоятки для диагностических приборов

### Автоматический соединитель:

Возьмите рукоятку в одну руку, а другой рукой вставьте зубцы коннектора в отверстия на головке рукоятки (1). Нажимайте на прибор, пока не услышите щелчок. Чтобы отсоединить прибор, поверните кольцо (2) против часовой стрелки. Другой рукой осторожно вытащите прибор.

### Резьбовой соединитель:

Рукоятки alpha имеют соединитель с резьбой, к которому можно прикрутить любые приборы alpha.

### Контроль яркости:

Чтобы включить контроль яркости, поверните регулятор (4) по часовой стрелке - при использовании рукояток BETA NT 3,5 одновременно нажмите кнопку (5). Если в окошке (6) отображается "1", то установлена максимальная яркость. Вы можете выбрать любое значение между "0" и "1".

### Замена батареек:

Открутите нижнюю крышку (7), чтобы заменить батарейку.

### Использование непerezаряжаемых батареек:

При использовании малой батареечной рукоятки или рукоятки alpha вы можете заменить аккумулятор двумя батарейками IEC LR 06.

**Очистка:**

Для очистки протрите все детали прибора тканью, смоченной в спирте или слабом очистителе. Автоклавирование и погружение в жидкости запрещено.

**Рукоятки для фиброоптических ларингоскопов:**

(Пожалуйста, обратитесь к соответствующей инструкции)

**Технические спецификации:**

	<b>Вольтаж</b>
Входные параметры (см. идентификационную плату) :	100 V ~ переменный ток 50 Hz 120 V ~ переменный ток 50/60 Hz
Потребление энергии:	max. 9 V A
Ток подзарядки: ожидание:	ок. 50 mA
быстрая зарядка:	ок. 300 mA
Предохранитель:	термальный предохранитель в трансформаторе
Работа:	непрерывная
Классификация:	Тип BF
Класс безопасности:	двойная изоляция
Размеры:	129x77x61 мм
Вес:	400 г
Температура окруж. среды:	+10° - +40 °C
Международная защита:	IP 20

**Аксессуары и запасные части:**

Запасной аккумулятор для всех перезаряжаемых рукояток ВЕТА 3,5 V	X-02.99.380
Большой адаптер для зарядного устройства NT 200	X-02.99.080
Двойной адаптер	X-02.99.081
Аккумулятор для малой батарейки	X-01.99.471

**Применимые стандарты:**

**EN 60 601-1 (1990)**

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

" - "

<http://heine-med.ru/>  
[info@heine-med.ru](mailto:info@heine-med.ru)

127 238, . , Дмитровское ш. 85  
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE ( ) -

!

