



Защита, Техническое обслуживание и Очистка / Дезинфекция биноккулярных луп HEINE HR/ HRP/ HR-C

Защита

Оптика луп хрупкая и должны быть защищена от царапин, вызванных пылью и / или грязью. Пожалуйста, используйте *съёмные защитные линзы* при работе с лупами.

Очистка/ Дезинфекция

Перед очисткой достаньте предохранители линз.

Оптика HEINE водостойкая и ее можно вымыть в текущей воде.

Для удаления остатков грязи с оптики или корпуса используйте мягкую щетку.

Внимание: грубые/ металлические щетки могут нанести вред оптике.

Не используйте абразивные детергенты для очистки луп.

Корпус и оптику протрите влажной тканью, смоченной небольшим количеством спирта или неагрессивного очистителя.

Используйте микроволоконную ткань, чтобы удалить отпечатки пальцев и пыль с оптики.

Допускается Дезинфекция путем опрыскивания или протирания.

Для дезинфекции используйте только дезинфицирующие средства, которые были утверждены для медицинских устройств, изготовленных из пластика.

Рекомендуется применение изопропилового спирта при максимальной концентрации 70%.

Использование моющего средства для линз HEINE

Моющее средство для линз HEINE также может использоваться для очистки оптики и пластиковых частей луп. Опрыскивание оптики данным моющим средством разрешается, так как оптика HEINE водостойкая.

Внимание: моющее средство для линз HEINE не является дезинфицирующим раствором.

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

"

-

"

<http://heine-med.ru/>
info@heine-med.ru

127 238, . , Дмитровское ш. 85
: (495) 902-59-26 ., , (495) 518-55-99

HEINE,

HEINE () -

!

